


- anwendungsfertige Schnelldesinfektion, alkoholfrei
- mit bester Reinigungswirkung und angenehmer Beduftung
- auch als Schaum einsetzbar
- aldehydfrei
- extrem schnelle bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit
- wirksam gegen Grippe, Noro und MRSA
- VAH- gelistet
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"

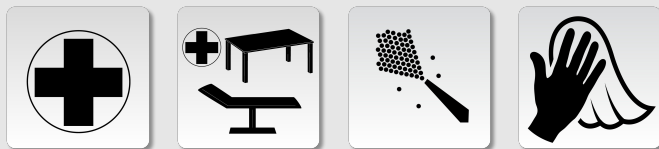

RHEOSEPT-WD plus

Schnellwirkende alkoholfreie und anwendungsfertige Wischdesinfektion

Produktbeschreibung

Alkoholfreies Schnelldesinfektionsmittel mit guter Reinigungswirkung und angenehmer Beduftung zur Wischdesinfektion und Flächenreinigung von wasserfesten Oberflächen (auch Acrylglasflächen) im medizinischen Bereich. In anwendungsfertiger Konzentration (ready-to-use). Wirksam bereits nach einer 1 Minute. Gelistet bei der VAH (Verband für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Wirksamkeit: bakterizid, fungizid, viruzid (behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Grippe, Vaccinia sowie zusätzlich Noro und Rota). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).

Anwendungsbereiche

Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen. Schnelldesinfektion im

Wischverfahren für alle wasserfesten Oberflächen von Medizinprodukten, wie Geräteoberflächen, Ultraschallköpfen, medizinische Sensoren, Sitzen, Liegen, Wannen, aber auch Sonnenbänken. Geeignet für Materialien wie Kunststoffe, Lacke, Keramik, Acrylglas, etc. Spezielle Eignungsgutachten für Plexiglas, Ultraschallköpfe und Inneneinrichtungen von Rettungswagen liegen vor.

Anwendungshinweise

Bei der Reinigung und Wischdesinfektion Produkt unverdünnt auf die zu desinfizierende Oberfläche auftragen und mindestens eine Minute einwirken lassen. Einwirkzeiten je nach Einsatzbereich beachten. Bei der Verwendung der RHEOFIX-wischBox WD-gelb maximale Standzeit von 4 Wochen beachten. Bei sichtbaren Vorverschmutzungen ist die Oberfläche zunächst mit der RHEOSEPT-WD plus vorzureinigen. Je nach Einsatzbereich

des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen. Das Produkt kann auch als Schaum mit dem RHEOSOL-Schäumer Maxi oder einer Pumpschaumflasche verwendet werden. Nicht mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mischen.

Wirkungsspektrum

Wirksamkeit: bakterizid, fungizid, viruzid (behüllte Viren wie HIV, HBV, HCV, Grippe, Vaccinia sowie zusätzlich Noro und Rota).

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Bakterizid/Fungizid EN 1276, EN 13697, EN 1650
Einwirkzeit 5 Minuten	unverdünnt	Bakterizid/Fungizid (VAH) niedrige Belastung/Mechanik
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	behüllte Viren (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grippe) EN 14476
Einwirkzeit 30 Minuten	unverdünnt	Norovirus (MNV) EN 14476
Einwirkzeit 60 Sekunden	unverdünnt	Rotavirus
Einwirkzeit 5 Minuten	unverdünnt	Polyomavirus SV40

Zusammensetzung

In 100g sind enthalten: 0,25g Dialkyldimethylammoniumchlorid, 0,25g Benzalkoniumchlorid, 0,25g Alkyldimethyl (ethylbenzyl) ammoniumchlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Duftstoffe, Limonene.

Physikalisch-chemische Daten

- > pH-Wert (Konzentrat) 7
- > pH-Wert (Anwendung) ca. 7

Besondere Hinweise

Das Produkt ist kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung. Die beim Umgang mit flüssigen Chemikalien geltenden Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch trotzdem beachtet werden. Behälter dicht geschlossen halten und vor Sonneneinstrahlung schützen. Chargennummer und Verwendbarkeitsdatum als gesonderten Aufdruck auf der Verpackung beachten. Produkt nicht versprühen. Nutzen Sie ggf. einen Schäumeraufsatz.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20512352	RHEOSEPT-WD plus Flasche 1000 ml mit Schäumer	Karton
20512001	RHEOSEPT-WD plus Wischdesinfektion Nachfüllset	Karton
20512050	RHEOSEPT-WD plus Kanister 5 Liter	Kanister
20512100	RHEOSEPT-WD plus Kanister 10 Liter	Kanister
20512002	RHEOFIX-wischBox WD-gelb	Karton

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluss mit Gewinde 51	Stück
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48029002	Flaschenhalter für 4 Flaschen à 1000 ml	Stück
48029006	Flaschenhalter für 6 Flaschen à 1000 ml Edelstahl	Stück
48029003	Kanisterhaken für 10 Liter Kanister	Stück
48006009	Schäumer Maxi lose Stück	Stück

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Registrierungen

Gelistet bei der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene e.V.) nach den Richtlinien der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e.V.). Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

RHEOSEPT®

RHEOSOL®

Wachendorff • Chemie GmbH • Langbaughstr. 15 • DE 53842 • Troisdorf • Germany
☎ +49 2241 3923-0 📠 +49 2241 3923 90 ✉ info@rheosol.de 🌐 <http://www.rheosol.de>